

## Návod na obsluhu respirátora Media Sanex CTPL-0020 FFP2 NR

**PRED POUŽITÍM:** skontrolujte masku vrátane všetkých prvkov, ktoré sú jej súčasťou, či nie sú prederavené, roztrhnuté, alebo akýmkoľvek spôsobom poškodené, alebo zničené. Ak objavíte akékoľvek poškodenie – **NEPOUŽÍVAJTE respirátor**, ale použite nový.

**A. ODPORÚČANÉ NASADENIE RESPIRÁTORA:** Pred prvým použitím je potrebná dôkladná hygiena rúk pomocou mydla a teplej vody. **1.**Po umytí rúk otvorte respirátor rozovretím nosnej výstuhu **2.**Predtvarujte nosnú výstuhu a priložte respirátor k tvári. **3.**Pretiahnite upínacie gumičky cez uši. Správne nasadená ochranná maska musí tesne doliehať k tvári a má zakrývať ústa, nos aj bradu. Muži by mali byť oholení, nakoľko brada môže spôsobiť netesnosť. Pri snímaní masky sa dotýkajte iba popruhov, nie časti, ktorá filtrovala vzduch. **4.**Dotvarujte nosnú výstuhu. Respirátor je správne a pevne pripevnený, ak cítite silný odpor proti výdychu a steny respirátora sa tlačia preč od tváre. Ak sa zistí akýkoľvek únik, musí sa čelná časť opäť nastaviť a skontrolovať jej tesnosť, ak respirátor nemožno utesniť, musí sa vymeniť. **\*POZOR:** Ak sa Vám dýcha ťažko, znamená to, že sa maska poškodila, alebo sa nedá správne prispôsobiť, preto masku okamžite vymeňte za inú. Dôkladné dodržiavanie vyššie uvedených pokynov je veľmi dôležité pre bezpečné používanie masiek.



**B. VÝZNAM MOŽNÝCH PIKTOGRAMOV / SYMBOLOV NA BALENÍ:** a. Overtvorte v užívateľskej príručke. b. Rozsah teplôt skladovania. c. Maximálna úroveň relatívnej vlhkosti pri skladovaní. d. Lehota použiteľnosti: uvedený na výrobku. e. Túto masku je možné použiť len jednorázovo (maximálne 12 - 15 hodín). Masku sa nesmie používať viackrát. f. Táto maska úspešne prešla nepovinnými skúškami upchávania dolomitovým prachom pre ľahšie a komfortnejšie dýchanie. g. Recyklácia / separovaný odpad. h. Doporučený spôsob likvidácie

**VAROVANIA:** Nedodržanie všetkých pokynov a obmedzení týkajúcich sa tohto výrobku môže znížiť úroveň filtrovania a viesť k poškodeniu zdravia alebo k strate života. Dobre vybraná filtrujúca polomaska predstavuje dôležitý prvok ochrany zdravia. Pred použitím masky sa poraďte s odborníkom na BOZP. Výrobok nie je zdrojom kyslíka. Používajte iba v dobre vetraných miestnostiach so vzduchom s dostatočným množstvom kyslíka na dýchanie. Tento typ masky sa nesmie používať, ak koncentrácia kyslíka vo vzduchu je nižšia ako 19%. Nepoužívajte, ak je koncentrácia nebezpečných látok nebezpečná pre zdravie, alebo život. Nepoužívajte, ak sa vo vzduchu nachádzajú výbušné zmesi. Opustíte pracovisko a vyjdete na čerstvý vzduch ak (a) sa vám začne ťažko dýchať, alebo (b) začne sa vám krútiť hlava, alebo sa objavujú iné nebezpečné príznaky. Brada, alebo iné špecifické vlastnosti tvaru tváre môžu znížiť efektívnosť masky. Masky sa v žiadnom prípade nesmú nejakým spôsobom upravovať alebo prerábať. Použitú masku vyhodte. Masky určené na používanie skladujte tak, aby boli chránené pred pôsobením priameho slnečného žiarenia. **NECHRÁNI** pred plynmi s koncentráciou nad 1 OEL. V tomto prípade použite plynovú masku.

**VÝROBCA:** Connexions Technology (Dong Guan) LTD. No.6, Shenbao Road, Qishi Town, Dong Guan, Guang Dong, China

**DOVOZCA:** Power Traders 2020 BV, Alcoaalaan 2Z, 5151RW Drunen, The Netherlands

**DISTRIBÚTOR:** Danimani.s.r.o., Tulipánova 3, 071 01 Michalovce, [info@danimani.sk](mailto:info@danimani.sk)

Vyrobené podľa nariadenia (EU) 2016/425, EN 149:2001+A1:2009

Certifikované: SGS FIMKO OY, Takomantie 8, 00380 HELSINKI, Finland, Notified Body number : 0598 (ex-0403)

CE certifikát: <https://tinyurl.com/CertCTPL0020>

Vyhlasenie o zhode: [www.tinyurl.com/CTPL0020](http://www.tinyurl.com/CTPL0020)